

使用说明书

品名

一次性使用全自动回缩型安全注射器（带针）

结构和规格

· 包含外套、活塞、推杆、针座、针管、防液圈、回缩装置、后塞和护套（包括胰岛素安全注射器后护套）。

· 产品规格：

胰岛素安全注射器：0.5ml 和、1ml

安全注射器：1ml、3ml、5ml 和、10ml

针规：31G、30G、29G、28G、27G、26G、25G、23G、22G、21G 和 20G

性能和特点

- 无菌、无热源
- 安全、单手操作
- 针管回缩后，对病人和医务人员无害（针头从体内直接回缩）
- 在穿刺药液瓶塞 3 次后，针管仍然锋利（图 2）

用途与范围

· 专门为临床注射设计，包括肌肉注射、皮下注射、皮内注射、静脉注射和抽血。

使用说明


临床医生应熟知使用说明书，并经临床注射部门培训。正确使用步骤如下：

1. 打开包装，将护套从针管上取下（胰岛素安全注射器的后护套从推杆上取下）（图 1）。
2. 将针管插入药液瓶内，抽吸药液至筒身内（图 2）。
3. 排出筒身内气泡后进行注射。缓慢注射（图 3）。
4. 完成注射后，将推杆推到底，针管将自动回缩（图 4）。

注意事项

1. 使用前请阅读“使用说明”部分。
2. 包装破损或护套脱落切勿使用。
3. 在取下包装之前，注射器是无菌的，仅供一次性使用。
4. 使用前，请仔细检查推杆前端是否带卡钩，若无卡钩，请勿使用（图 9）。
5. 当抽液进注射器时请勿用力过猛，用力过猛可能会使 O 型圈移位，使针管不会回缩（图 5）。
6. 注射器前，请勿将推杆推过“警戒线”（图 6）。
7. 请缓速注射。注射速度过快可能使 O 型圈移位或引起针管不会回缩。
8. 在药液或液体完全注射完的同时，安全特性才能被激活（如药液或液体未被完全注射完，针管不会自动回缩）（图 7）。
9. 如果在药液或液体完全注射完后针管不会自动回缩，请将推杆拉回至针管在筒身内（图 8）。

标识

1. 一次性使用 

2. 环氧乙烷灭菌 

存储

防潮防热。应存储在无腐蚀气体、干燥、通风良好和干净的室内环境。

有效期：3年

生产商

汕头华尔怡医疗器械有限公司

广东省汕头市金环北路（岐山中学路段）

邮编：515064

电话：+86 754 82121747, 82121967, 82121767

传真：+86 754 82121654

Rev.IFU-A1 生效日期：2016.11.07

WEALY.COM